

> L'ACADEMY #1

IHR NEUER MONATLICHER NEWSLETTER

VORWORT

Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres Newsletters Academy vorzustellen: Ihr neuer monatlicher Newsletter unserer Winback-Akademie. Hauptziel ist es Ihnen eine Synthese unseres Austausches in den sozialen Netzwerken wie beispielsweise die Gruppe Winback Academy - Physio - Sport darzustellen.


Zusätzlich präsentieren wir Ihnen unsere spezifischen Expertenprotokolle, die den verschiedenen Abteilungen der

Akademie entsprechen (manuelle Therapie, Sport, Intimty, Beauty...), aber auch Empfehlungen für die Anwendung, zukünftige Schulungen, neues Zubehör usw. Experten spezifische Protokolle, die den verschiedenen Abteilungen der Akademie entsprechen (manuelle Therapie, Sport, Intimty, Beauty...), aber auch Empfehlungen für die Anwendung, zukünftige Schulungen, neue Zubehöre usw.



WINBACK

AKTUELLE MELDUNGEN DES MONATS

In diesem Monat haben wir eine Studie über die Wirkungen der Winback-Therapie auf die im Anschluss an eine Total-Knieprothese operierten Knie (von T15 bis T30) gestartet. Eine derart umfassende Studie erfordert Ihr volles Engagement, um unsere therapeutischen Ergebnisse im Bereich der Tecar-Therapie in der wissenschaftlichen und medizinischen Fachwelt zu verbreiten.

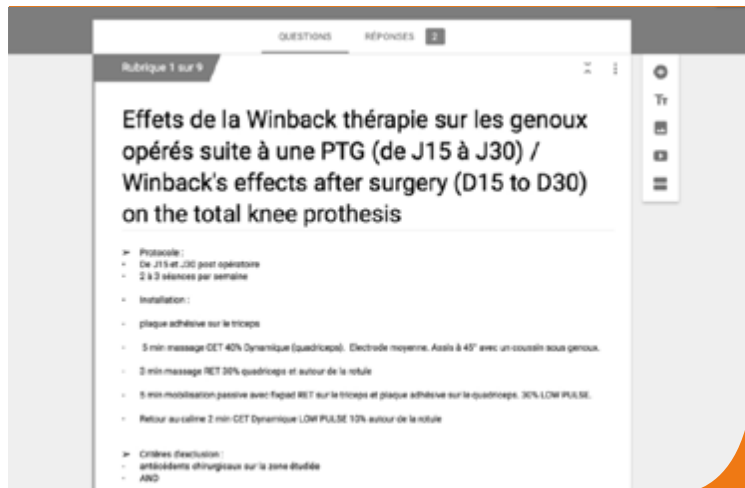

Denken Sie an uns, wenn Sie eine Total-Knieprothese haben!! Das Formular ist denkbar einfach auszufüllen (sie finden es auf der Facebook-Gruppe Winback Academy - Physio - Sport). Wenn Sie an diesem Abenteuer teilnehmen möchten, senden Sie eine E-Mail an zaineb@winback.com

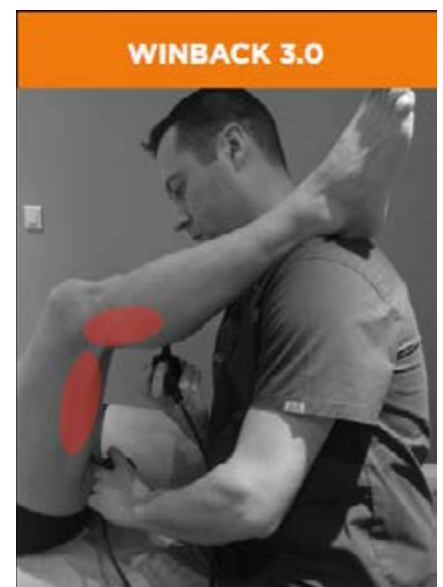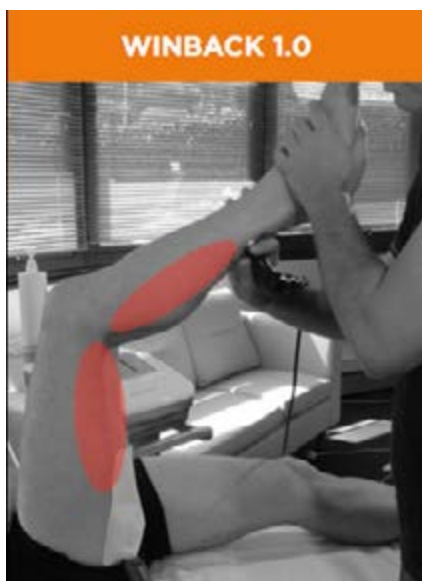




ENTWICKLUNG EINES NEUEN KONZEPTES: WINBACK WOMAN CARE

Winback entwickelt neue Protokolle, um die spezifischen Erwartungen der Frauen in den wichtigen Phasen ihres Lebens zu erfüllen, zum Beispiel:

- Post partum
- Menopause
- Lymphatische Probleme
- Schönheit und Physiopathologie.

In den kommenden Ausgaben werden Ihnen Aurore Chambaudu, Muriel Bise und Patricia Brizon die ersten Versionen der Protokolle enthüllen. Die Veröffentlichung des kompletten Konzeptes ist für September 2017 vorgesehen.

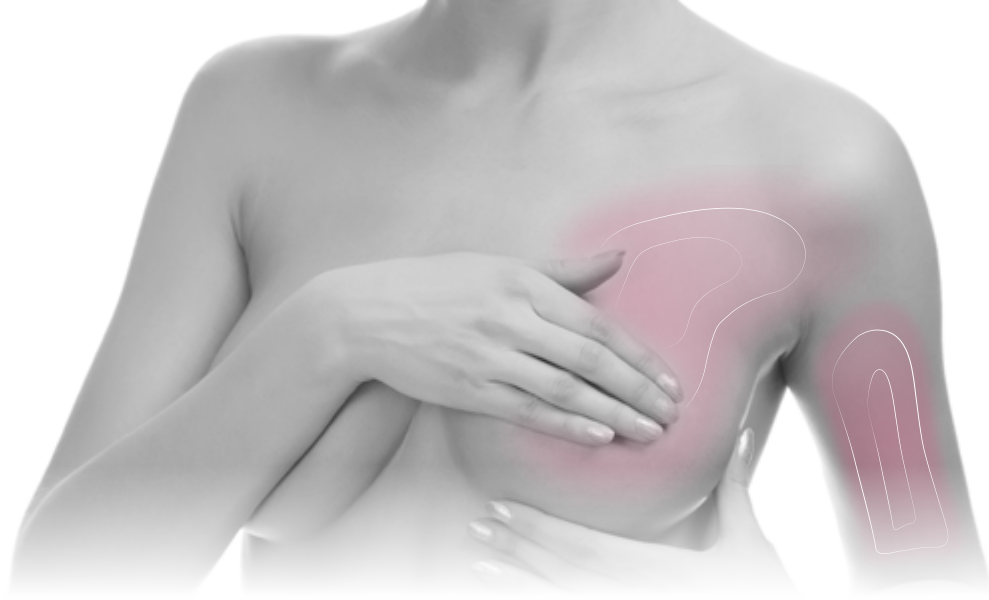

POSTOPERATIVE BEHANDLUNG VON BRUSTKREBS MIT WINBACK

Der Winback-Physiotherapeut wird in der Regel während des chirurgischen Eingriffs eingeschaltet:

Nach der Entfernung des Wächterlymphknotens oder nach einer axillären Lymphknotendissektion, um die Beweglichkeit des operierten Oberarms zu fördern. Durch Auswahl des resistiven Modus RET ermöglicht es Winback, die verschiedenen Gelenke mit einer kompletten Schmerztherapie zu behandeln. Im Fall eines Lymphödems (Ödem lymphatischen Ursprungs am Arm) fördert Winback die Drainage durch eine selektive Stimulierung der verschiedenen Lymphknoten (lokale Gefäßerweiterung) mit einer MIX3-Elektrode. Die Winback-Therapie ermöglicht es, das Lymphödem am Arm aktiv zu bekämpfen. Diese Art der Komplikation betrifft annähernd jede 4. Frau. Sie zeichnet sich durch ein Ödem am Arm der betroffenen Seite aus. Der Arm neigt dazu, anzuschwellen. Er wird schwer und schmerzhaft. Dieses Lymphödem kann einige Tage nach der Behandlung oder Monate und sogar Jahre später auftreten. Die Anwendung der TECAR-Therapie von Winback ermöglicht es, dem Lymphödem vorzubeugen oder eine Verschlechterung zu verhindern.

Vor einer Brustrekonstruktion verfügt der Therapeut zur Vorbereitung der Haut und der Muskeln über verschiedene Methoden, um die Geschmeidigkeit des Gewebes zu verbessern. Mit WINBACK 4.0 können die verschiedenen Schichten der Dermis schnell und gezielt erreicht werden. Der neue resistive Modus RET+ erleichtert das manuelle Abtasten-Rollen und sorgt für ein Höchstmaß an Komfort.

Nach der Rekonstruktion durch Prothese zur Bekämpfung von Verwachsungen. Winback erarbeitet verschiedene Protokolle, um eventuelle lymphatische Durchblutungsstörungen und/oder Hämatome zu beheben. Die Winback-Energie beschleunigt die Vernarbung.

Nach einer Rekonstruktion durch den großen Rückenmuskel um die Verwachsungen dort, wo der große Rückenmuskel entnommen wurde, und alle Risiken einer späteren Fibrose auszuschalten, führt Winback mit dem resistiven Modus SuperBeat eine Neuerung ein, indem die Diathermie mit einer neuro-sensitiven Mobilisierung durch elementare Stöße (weitgehend im Umfeld der Niederfrequenz anerkannt) verbunden wird.

Bei postoperativen Schmerzen, für eine sofortige Schmerzlinderung, für den Komfort und die funktionellen Bewegungen bietet Winback Sitzungen im SWAP-Modus an. Diese Option ermöglicht es, während der Sitzung zwischen dem kapazitiven und dem resistiven Modus zu wechseln.

NEUER WINBACK-SHOWROOM IN PARIS / SCHULUNGSRAUM:

Wir verfügen nunmehr über einen neuen Showroom, der als Schulungsraum dient, in Paris, 117 Boulevard Sébastopol 75002 Paris.

FÜR JUNI ANGEKÜNDIGT: DREI MYEXPERT-SCHULUNGEN

10. JUNI 2017 - SHOWROOM PARIS SPORT & FIT INTERNATIONALE SCHULUNG



Boosten Sie die Sportpraxis mit der WINBACK-Energie.

Referenten: Pascal Gohier (Physiotherapeut der französischen Basketballmannschaft), Andrei Gheorgiu (internationaler Winback-Experte - Physiotherapeut für Sport in Brasov, Rumänien) und Frédéric Delacour (internationaler Winback-Experte - Osteopath).

Diese Schulung behandelt im Detail den Einfluss der Winback-Energie auf die verschiedenen Phasen der Betreuung der Sportler (von der Stärkung bis zur sportlichen Erholung) und praktische Fälle wie beispielsweise Pubalgie, myoaponeurotische Läsionen oder Springerknie von der Läsion bis zur Rückkehr auf den Sportplatz.

17. JUNI 2017 - SHOWROOM PARIS INTIMITY



Mit der WINBACK-Energie ist Schmerz kein Schicksal.

Entdecken Sie die neuen Intimity-Protokolle rund um die Frau und ihrer Intimität dank des geeigneten Zubehörs.

Winback Intimity bietet Ihren Patientinnen neue Lösungen durch eine schnelle, komfortable und schmerzlose Behandlung. Die Schulung ist auf eine kurze Erklärung der Tecar-Technologie, eine Methodik der Anwendungen mit einer verbesserten Hygiene und schließlich eine Vorstellung von neuen Behandlungen, die von Ihren Fachkollegen getestet und validiert wurden, ausgerichtet: Episiotomie, Harninkontinenz, Kaiserschnittnarbe... Sie werden staunen, welches Potenzial in Ihren Geräten steckt, denn sie müssen nur mit wenigen Zubehören ausgestattet werden, um im Bereich der Gynäkologie und der Urologie über eine effiziente Ausrüstung zu verfügen




**Viszeraler Ansatz und
Tecar-Therapie von
WINBACK.**

Referenten: Frédéric Delacour
(internationaler Winback-Experte
und Osteopath in Ormesson,
Frankreich).

Wie können Sie die manuelle
Viszeraltherapie mit Ihrer
Ausrüstung verbinden?

Im Rahmen dieser Schulung werden die Techniken der manuellen Therapie in den Bereichen Leber, Magen, Bauchhöhle und Schließmuskel im Detail behandelt. Unabhängig davon, ob Sie in der Viszeraltherapie ein Anfänger oder schon erfahren sind, werden Sie überrascht sein, wie einfach die Behandlung mit der Tecar-Therapie ist.

DAS FOTO DES MONATS: DRY NEEDLING

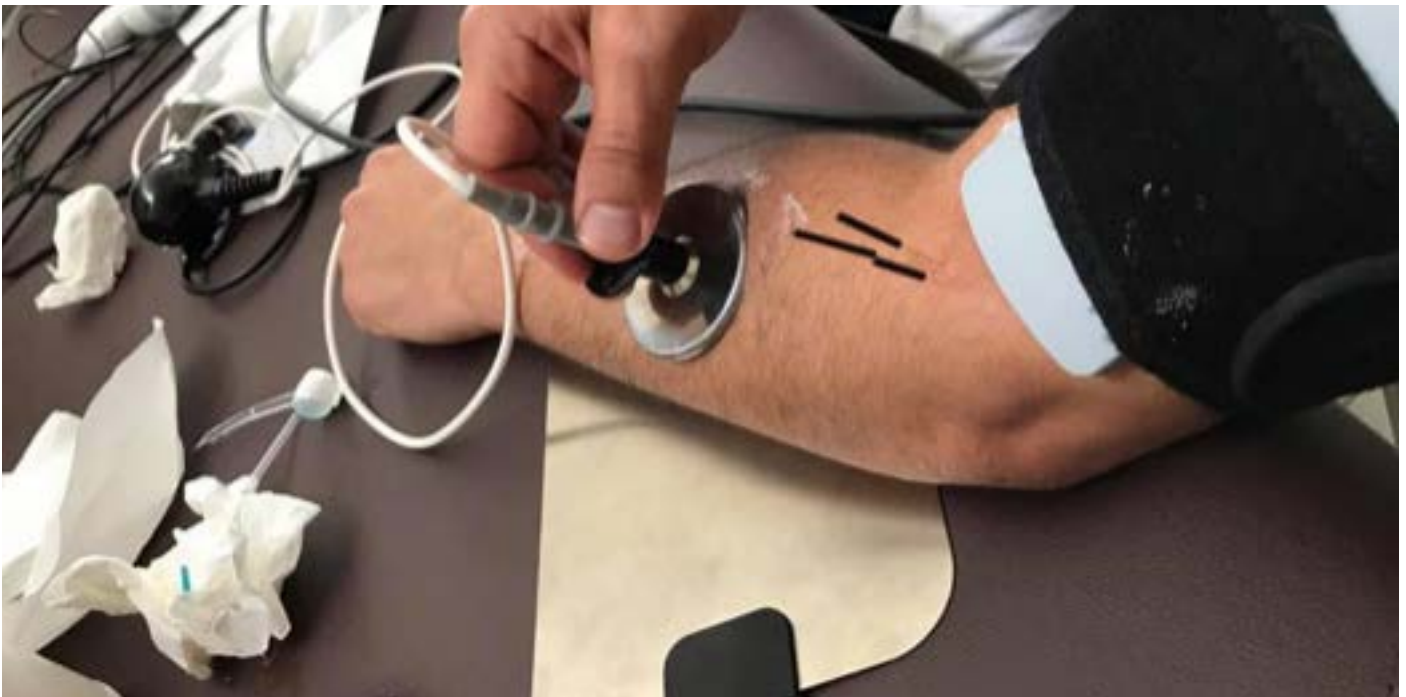







Die Ärztekammer prüft derzeit die Möglichkeit, die Anwendung des Dry Needling (Verwendung von Akupunkturnadeln zur Behandlung der Triggerpunkte) in unseren Kompetenzbereich einzubeziehen. Wir hoffen, dass dies sehr bald möglich sein wird! Diese Technik wird bereits von den meisten unserer europäischen Kollegen eingesetzt. Allen voran die Griechen, die einen Weg gefunden haben, diese Technik mit der Winback-Therapie zu verbinden. Wir danken Anastasios Tolis, unserem Experten für die Winback Academy Griechenland.

Bitte senden Sie uns Ihre Fotos (an zaineb@winback.com), damit wir sie in dieser Rubrik veröffentlichen!

DIE PRAKTISCHE STUDIE DES MONATS





FALLSTUDIE EINER PRELLUNG ZWEITEN GRADES NACH VERWEN-
DUNG DER TECAR-THERAPIE VON WINBACK

NICHOLAS CHATZOGLOU - FACHARZT FÜR PHYSIKALISCHE MEDIZIN

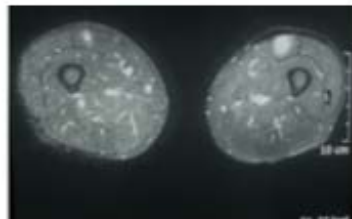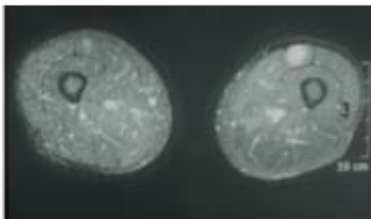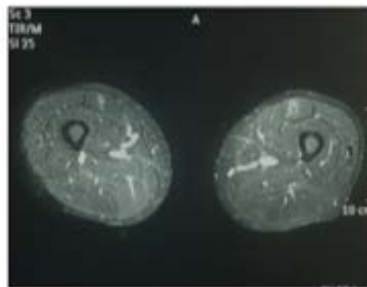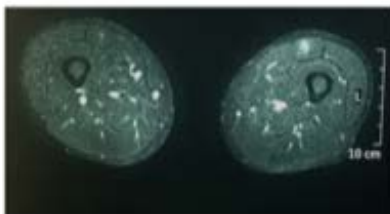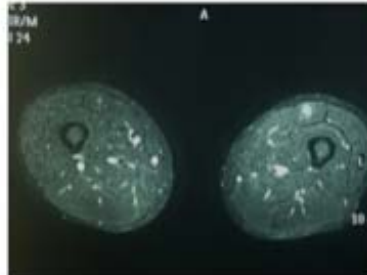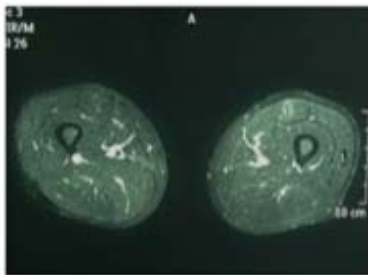

1. MRT 3 TAGE NACH DER VERLETZUNG



MANN, 43 JAHRE, WÖCHENTLICHER SPORT - 15 KM LAUFSPOURT

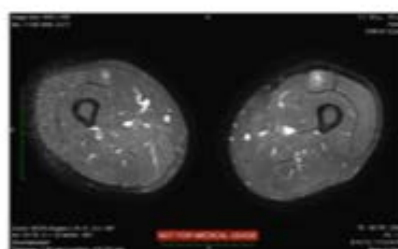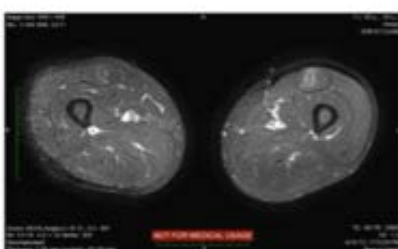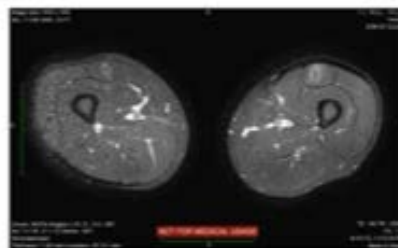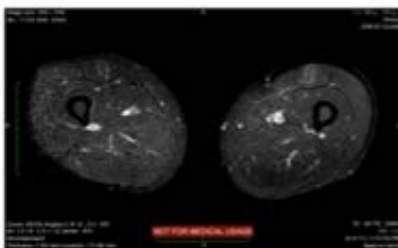

Prellung 2. Grades vierköpfiger Oberschenkelmuskel links
Prellung 1. Grades vierköpfiger Oberschenkelmuskel rechts

2. MRT 5 TAGE NACH DER VERLETZUNG





und ein Tag nach der ersten Behandlung des linken vierköpfigen Oberschenkelmuskels mit der Tecar-Therapie von WINBACK

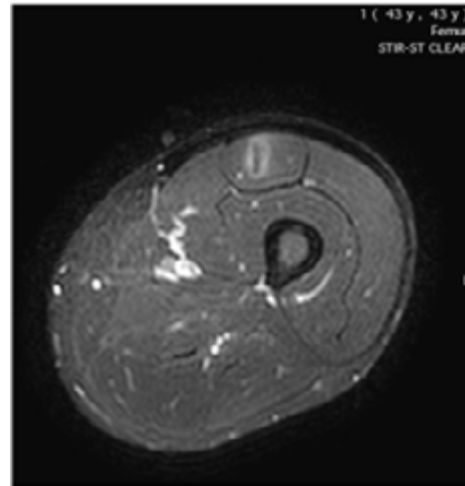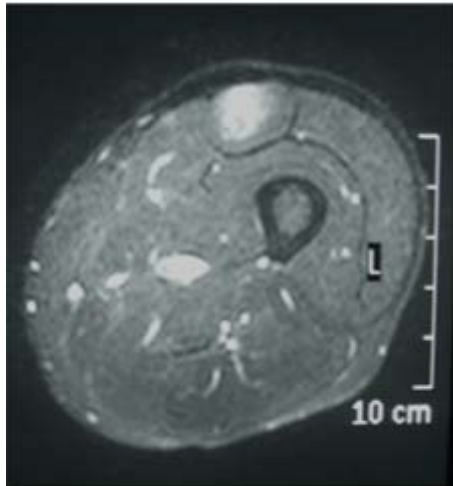

60% Rückbildung des Ödems auf dem linken vierköpfigen Oberschenkelmuskel.

3. MRT 9 TAGE NACH DER VERLETZUNG

VOR DER ZWEITEN BEHANDLUNG

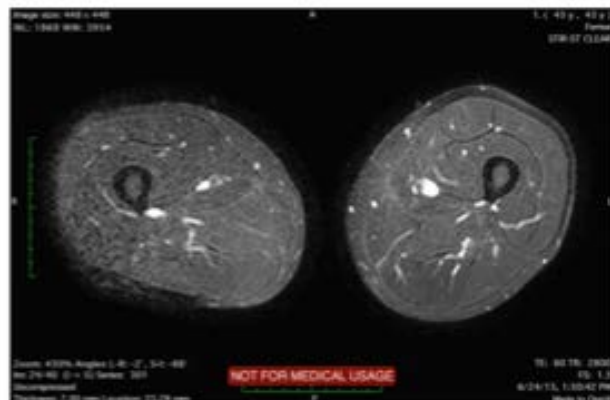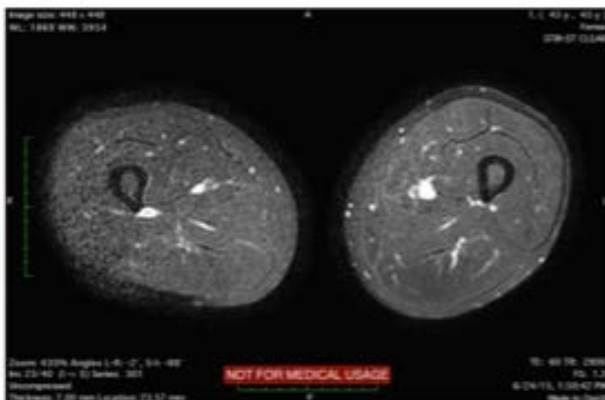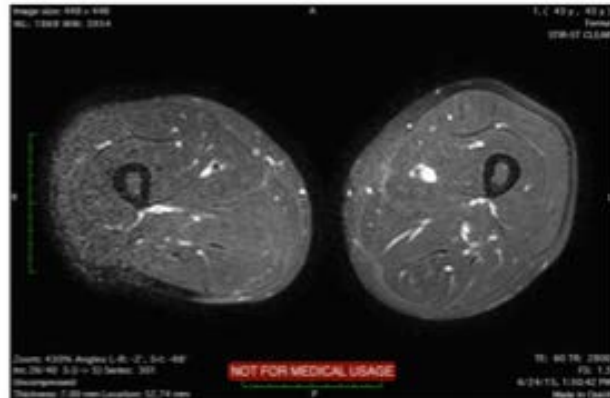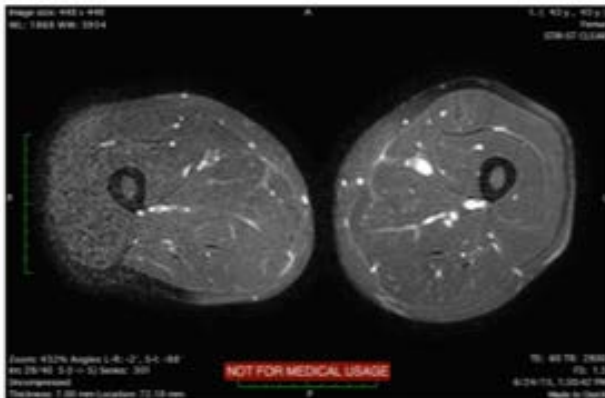

Keine Veränderung der 2 Seiten


4. MRT 20 TAGE NACH DER VELETZUNG

Die zweite Behandlung erfolgte 5 Tage nach der ersten und 9 Tage nach der Verletzung an den 2 vierköpfigen Oberschenkelmuskeln im Rahmen eines vollständigen Ruhezustands. Der Athlet hat 25 Tage nach seiner Verletzung seine sportliche Betätigung mit einer vollständigen Rückbildung des Ödems an beiden Seiten wieder aufgenommen.

5. NACH EINER BEHANDLUNG

DIE TECAR-THERAPIE-BEHANDLUNG WURDE MIT WINBACK DURCHGEFÜHRT.

**ENTDECKEN SIE IN DIESEM VIDEO 5
VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, IHR
WINBACK-GERÄT EINZUSETZEN.**

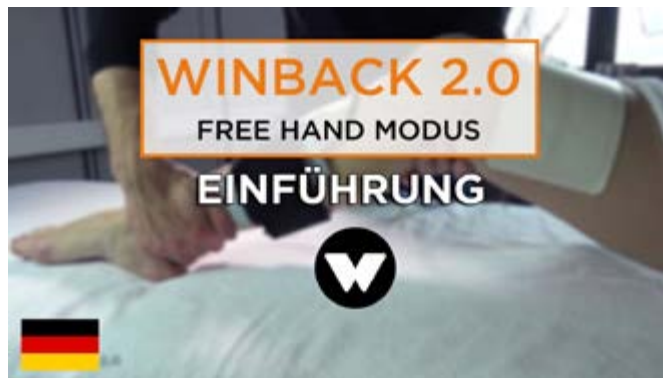

LESERBRIEFE

In dieser Rubrik nehmen wir uns die Zeit, zu Fällen, die Ihnen Probleme bereiten, Stellung zu nehmen. Unsere Experten für manuelle Therapie, Sporttherapie, Intimty & Beauty sind gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten und ihre Protokolle ausführlich zu beschreiben. Senden Sie Ihre Fälle an: zaineb@winback.com

SAVE THE DATE: KOMMENDE SCHULUNGEN!

MAI 2017

17 MAI 2017
MYPRACTICE PARIS

18 MAI 2017
MYPRACTICE NIZZA

19 MAI 2017
MYBEAUTY NIZZA

20 MAI 2017
CRYOBACK PARIS

JUNI 2017

10. JUNI 2017
MYEXPERT SPORT PARIS

14 JUNI 2017
MYPRACTICE PARIS

15 JUNI 2017
MYBEAUTY PARIS

17 JUNI 2017
INTIMITY PARIS

24 JUNI 2017
MYEXPERT MANUELLE
VISZERALTHERAPIE PARIS

Die Schulungen sind kostenlos! Nutzen Sie die Gelegenheit!

Melden Sie sich direkt auf der Website [winback.com](http://www.winback.com) in der Rubrik Winback Academy an. <http://www.winback.com/fr/formations/>

Bis bald!!

Ihr Team der Winback Academy