

# > L'ACADEMY #1

IL VOSTRO NUOVO APPUNTAMENTO MENSILE

## L'EDITORIALE


Siamo lieti di presentarvi il primo numero de L'Academy: il vostro nuovo appuntamento mensile sulle informazioni dell'accademia Winback. Il suo principale obiettivo è offrire una sintesi dei nostri dialoghi sui social network come il gruppo facebook Winback

Academy - Physio - Sport. I nostri esperti vi presenteranno inoltre, protocolli specifici corrispondenti ai diversi dipartiment dell'accademia (terapia manuale, sport, beauty...) ma anche consigli d'uso, le prossime formazioni, i nuovi accessori ecc...

WINBACK



# LE NOTIZIE DEL MESE

Questo mese, abbiamo avviato uno studio sugli effetti della terapia winback sulle ginocchia operate in seguito ad una PTG, Protesi Totale del Ginocchio, (da G15 a G30). Si tratta di un ampio studio che richiede la vostra partecipazione per condividere i risultati terapeutici nella tecarterapia nel mondo scientifico e medico.

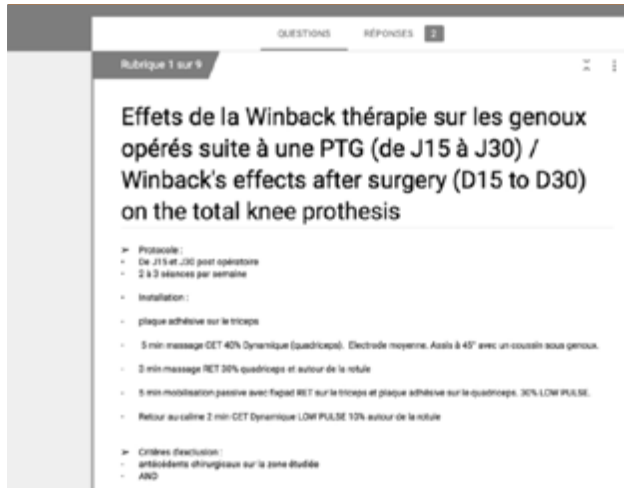

Se avete una PTG, pensate a noi!! Il modulo è molto semplice da compilare (consultatelo nel gruppo facebook Winback Academy - Physio - Sport).

Volete partecipare a quest'avventura? Inviatelo subito un'e-mail a [zaineb@winback.com](mailto:zaineb@winback.com)

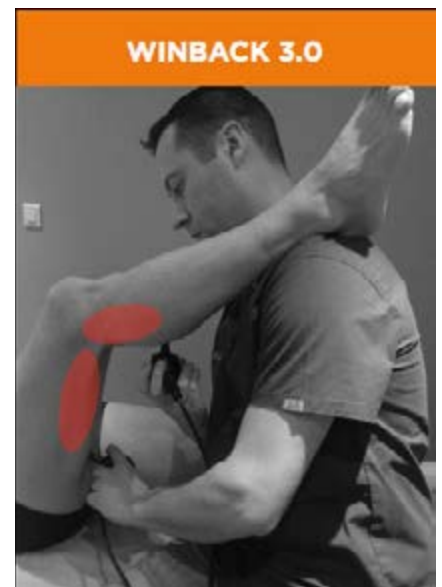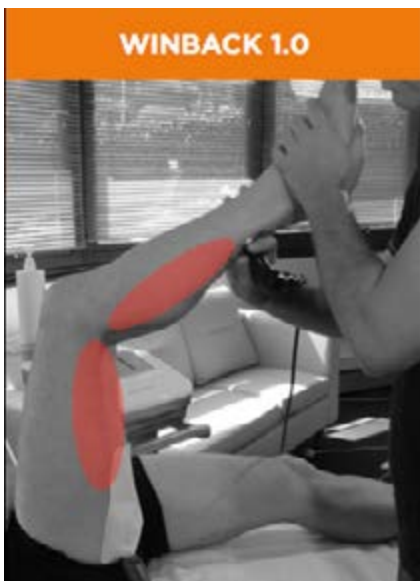




## **UN NUOVO CONCETTO IN FASE DI SVILUPPO: WINBACK WOMAN CARE**

Winback lancerà nuovi protocolli per rispondere alle specifiche aspettative delle donne durante momenti importanti della loro vita, quali:

- il post partum
- la menopausa
- i problemi linfatici
- un approccio della bellezza tramite la fisiopatologia.

**Aurore Chambaudu, Muriel Bise et Patricia Brizon** vi sveleranno la prima versione dei protocolli nei prossimi numeri. L'uscita del concetto completo è prevista per il mese di Settembre.

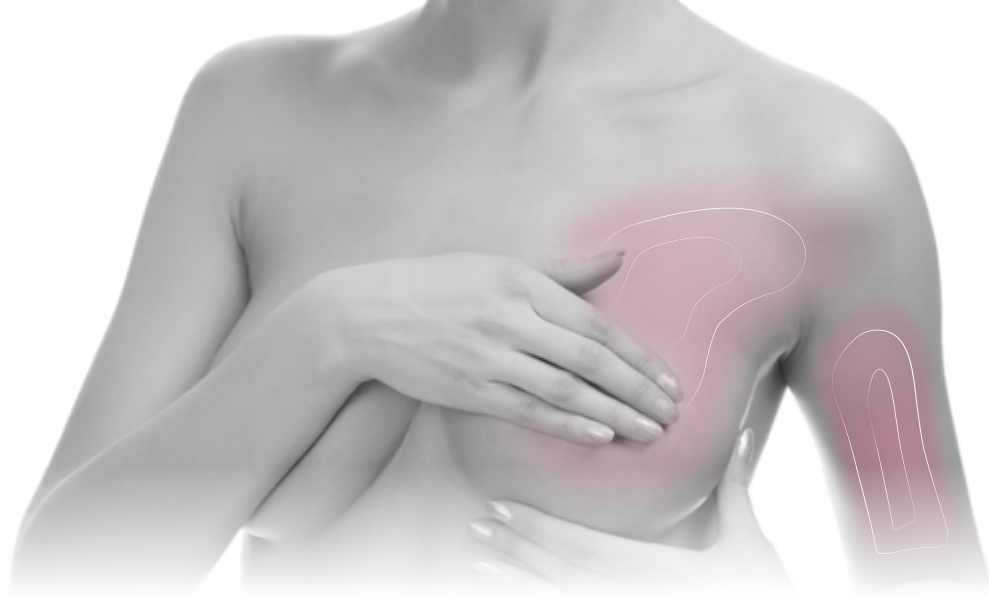

## TRATTAMENTO POST OPERATORIO DEL TUMORE DEL SENO CON WINBACK

Il cinesiterapista Winback interviene generalmente al momento della chirurgia:

**Dopo l'ablazione** del linfonodo sentinella o dopo svuotamento ascellare, per conservare la mobilità dell'arto superiore operato. In quel determinato momento, Winback consente di mobilitare, con un'analgesia totale, le diverse articolazioni mediante selezione della modalità resistiva RET. In caso di linfedema (edema del braccio di origine linfatica), Winback favorisce il drenaggio mediante stimolazione selettiva dei diversi linfonodi (vasodilatazione locale) tramite applicazione di un elettrodo MIX3 focale. La terapia Winback consente di contrastare attivamente il linfedema al braccio. Questo tipo di complicanza colpisce circa 1 donna su 4. Questa complicanza è caratterizzata da un edema a livello del braccio del lato colpito. Il braccio tende ad ingrossarsi. Diventa pesante e doloroso. Questo linfedema può manifestarsi qualche giorno dopo il trattamento e fino a mesi o addirittura ad anni più tardi. L'utilizzo della Terapia TECAR Winback consente di prevenire il linfedema o di evitare che si aggravi.

**Prima di una ricostruzione mammaria**, per preparare la pelle e i muscoli, il terapeuta dispone di diversi metodi per aumentare l'elasticità tissutale. WINBACK 4.0 consente di raggiungere rapidamente i diversi strati di derma. Scegliere la modalità resistiva inedita RET +, agevola il massaggio manuale con palpazione e rotolamento offrendo un comfort senza pari.

**Dopo una ricostruzione con protesi** per contrastare le aderenze. Winback elabora diversi protocolli per curare gli eventuali disturbi circolatori linfatici e/o gli ematomi favorendo il loro riassorbimento. L'energia Winback accelera la cicatrizzazione.

**Dopo una ricostruzione con lembo gran dorsale** per eliminare le aderenze dove il muscolo dorsale è stato prelevato, ed eventuali rischi di ulteriori fibrosi, Winback innova con una modalità resistiva SuperBeat che abbina alla diatermia un reclutamento mediante scosse elementari (ampiamente riconosciuto nel mondo della bassa frequenza).

In caso di dolori postoperatori, per un'immediata analgesia, un maggior comfort e movimenti funzionali, Winback propone sedute con la modalità SWAP. Quest'opzione consente di alternare la modalità capacitiva e resistiva durante la seduta.

# NUOVO SHOWROOM WINBACK A PARIGI / SALA FORMAZIONI:

Abbiamo un nuovo showroom a Parigi, ubicato in 117 Boulevard Sebastopol 75002 Paris, che fungerà da sala formazioni.

## PROGRAMMA DI GIUGNO: TRE FORMAZIONI MYEXPERT

**10 GIUGNO 2017 - SHOWROOM  
PARIGI - SPORT & FIT  
FORMAZIONE INTERNAZIONALE**



**Potenziare la pratica sportiva con l'energia WINBACK.**

Partecipanti: Pascal Gohier (cinesiterapista della nazionale francese di basket), Andrei Gheorgiu (Winback esperto internazionale - cinesiterapista sportivo a Brasov, Romania) e Frédéric Delacour (esperto internazionale Winback-osteopata).

Questa formazione tratterà: l'influenza dell'energia Winback nelle diverse fasi della cura degli sportivi (dal potenziamento al recupero sportivo), nonché alcuni casi pratici quali la pubalgia, le lesioni mio-aponevrotiche e il jumper knee dalla lesione fino al ritorno in campo.

**17 GIUGNO 2017 - SHOWROOM PARIGI  
INTIMITY**



**Il dolore non è una fatalità con l'energia WINBACK.**

Venite a scoprire i nuovi protocolli Intimity incentrati sulla donna e sulla sua intimità grazie ad accessori ad hoc. Winback Intimity offre nuove soluzioni alle pazienti, tramite cure rapide, confortevoli e indolori. La formazione si articola nel seguente modo: una breve rievocazione della tecnologia Tecar, una metodologia di applicazioni con un'igiene potenziata, ed infine la presentazione dei nuovi trattamenti provati e convalidati dai vostri colleghi: episiotomia, incontinenza urinaria, cicatrice da cesareo. Rimarrete stupiti delle potenzialità della vostra apparecchiatura, basta infatti aggiungere qualche accessorio per usufruire di un'apparecchiatura molto efficace nel campo della ginecologia e dell'urologia




**Approccio viscerale e  
tecarterapia WINBACK.**

Partecipante: Frédéric Delacour  
(esperto internazionale Winback e  
osteopata ad Ormesson, Francia).

Come abbinare la terapia  
manuale viscerale alla vostra  
apparecchiatura?

Questa formazione descriverà le  
tecniche di terapia manuale della  
regione epatica, gastrica, peritoneale  
e dello sfintere. Principianti ed  
esperti nell'ambito della terapia  
viscerale, rimarranno sorpresi della  
semplicità del trattamento offerto  
dalla Tecarterapia.

## LA FOTO DEL MESE: DRY NEEDLING

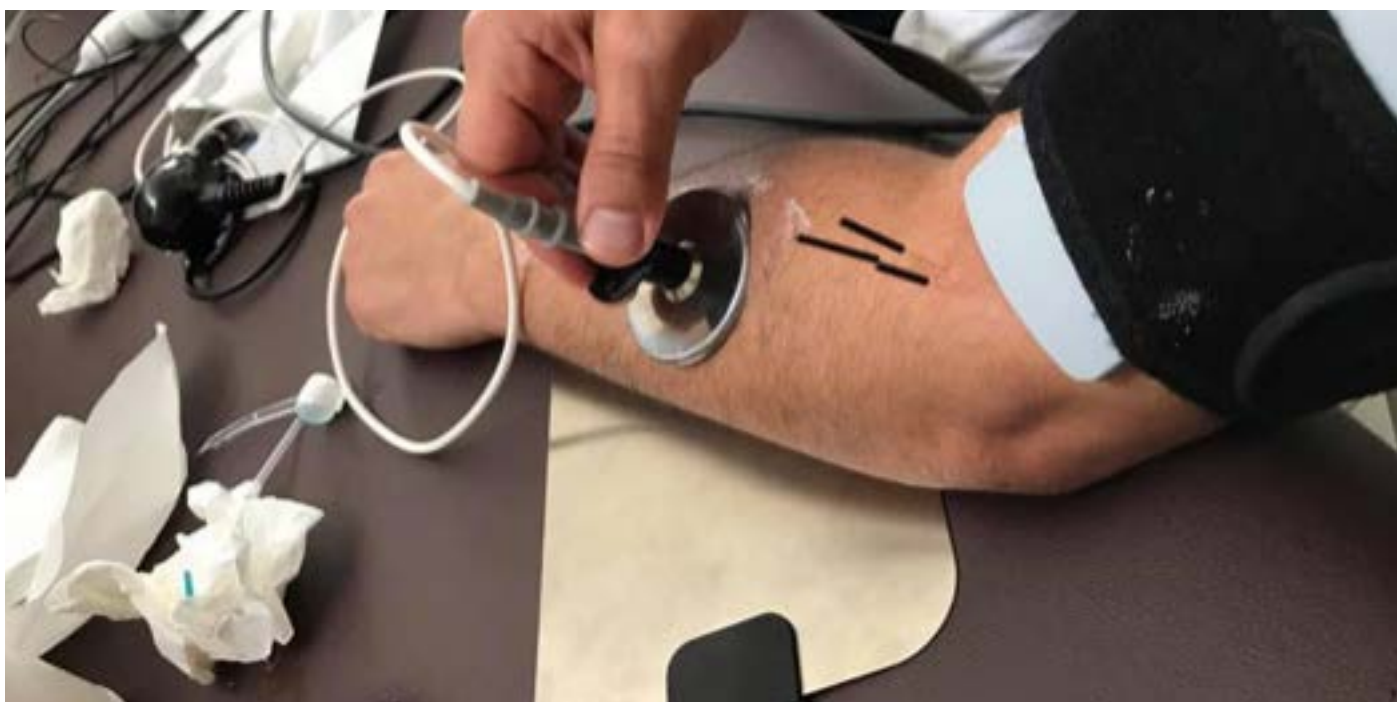






Il consiglio dell'ordine sta studiando la possibilità di far entrare nella nostra area di competenza la pratica del dry needling (impiego di aghi di agopuntura per trattare i trigger point). Ci auguriamo che ciò avverrà presto! Questa tecnica viene già utilizzata dalla maggior parte dei nostri colleghi europei. In particolare i greci, che hanno già trovato il modo di associarla alla terapia Winback. Grazie infinite ad Anastasios Tolis, il nostro esperto per la Winback Academy Grecia.

Inviatemi subito le vostre foto (al seguente indirizzo e-mail: [zaineb@winback.com](mailto:zaineb@winback.com)) per farle pubblicare in questa rubrica!

# LO STUDIO PRATICO DEL MESE





CASE STUDY SU UNA CONTUSIONE DI SECONDO GRADO DOPO L'USO DELLA TECARTEAPIA WINBACK

NICHOLAS CHATZOGLOU - DOTTORE IN MEDICINA FISICA

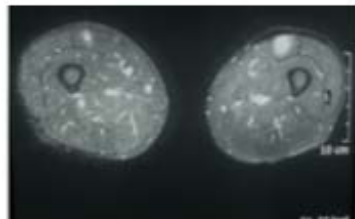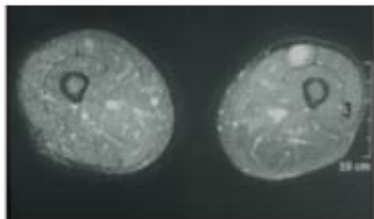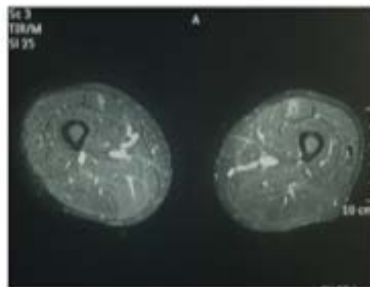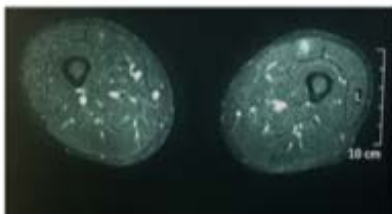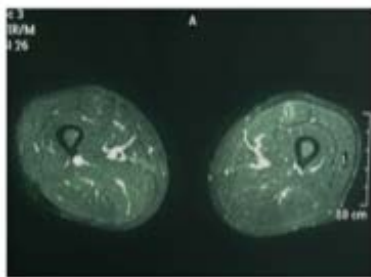

## 1. IRM 3 GIORNI DOPO L'INFORTUNIO



UOMO, 43 ANNI, ATTIVITÀ SPORTIVA SETTIMANALE - 15 KM DI CORSA PODISTICA

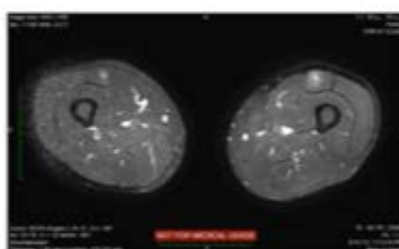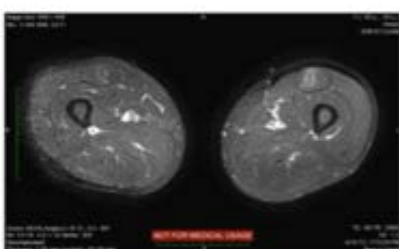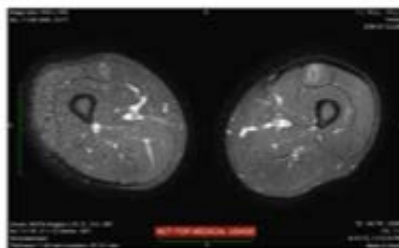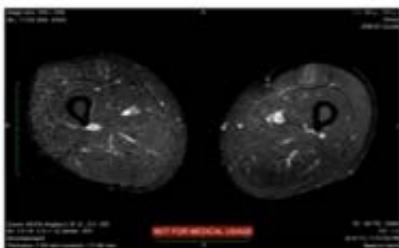

Contusione 2° grado quadricipite sinistro  
Contusione 1° grado quadricipite destro

## 2. IRM 5 GIORNI DOPO L'INFORTUNIO





e un giorno dopo il primo trattamento con tecarterapia WINBACK sul quadricipite sinistro

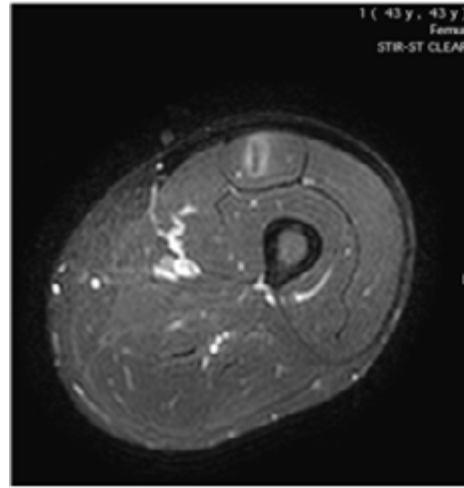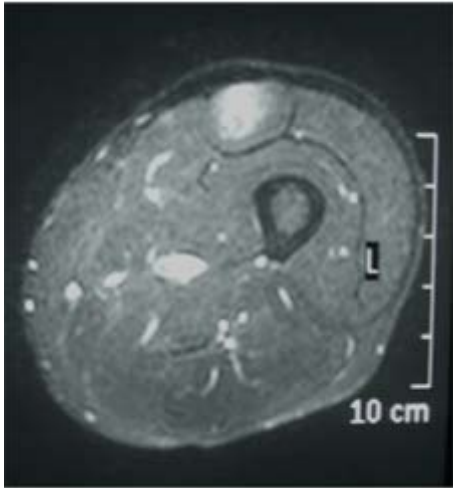

Riduzione dell'edema del 60% sul quadricipite sinistro.

## 3. IRM 9 GIORNI DOPO L'INFORTUNIO

NESSUN CAMBIAMENTO SUI 2 LATI

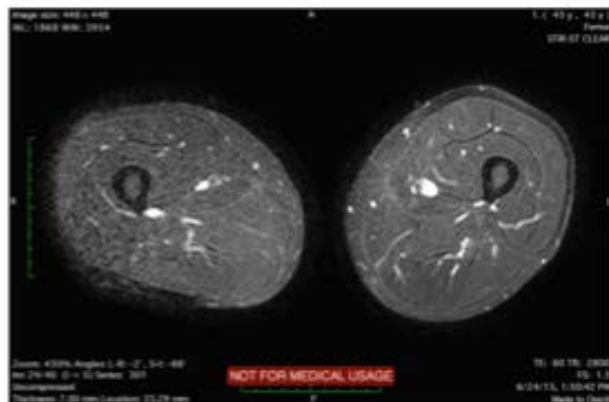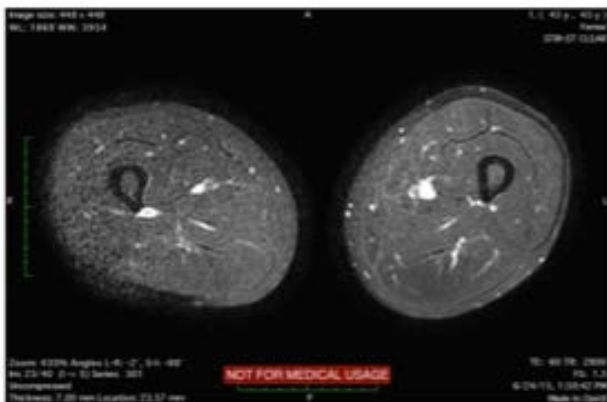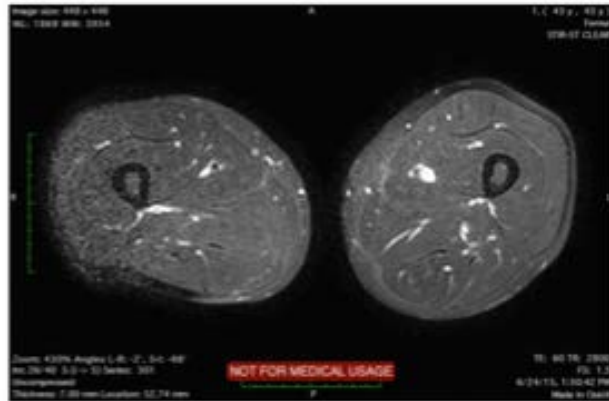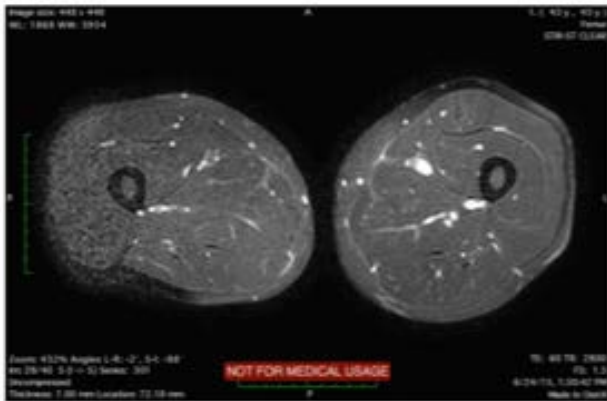

## 4. IRM 20 GIORNI DOPO L'INFORTUNIO

Il secondo trattamento è stato somministrato 5 giorni dopo il 1° e 9 giorni dopo l'infortunio sui 2 quadricipiti, in condizioni di riposo assoluto.

L'atleta ha ripreso l'attività sportiva completa 25 giorni dopo l'infortunio con un assorbimento totale dell'edema sui due lati.

## 5. DOPO UN TRATTAMENTO

IL TRATTAMENTO DI TECARTERAPIA È STATO SOMMINISTRATO UTILIZZANDO UNA WINBACK



**SCOPRITE, CON IL NOSTRO VIDEO,  
5 DIVERSI MODI DI UTILIZZARE IL WINBACK.**



## LA POSTA DEI LETTORI

Questa rubrica ci consentirà di rispondere a tutte le vostre domande. I nostri esperti in **terapia manuale, terapia sportiva, intimacy e beauty** saranno lieti di rispondervi e di descrivere i loro protocolli. Sottoponeteci i vostri casi al seguente indirizzo: [zaineb@winback.com](mailto:zaineb@winback.com)

## DA SEGNARE IN AGENDA: PROSSIME FORMAZIONI !

### MAGGIO 2017

**27 MAGGIO 2017**  
**MYSTART**  
**A MONZA (MB)**  
**DALLE 9H ALLE 13H**

### GIUGNO 2017

**03 GIUGNO 2017**  
**MYSTART**  
**A LECCE (PUOILLES)**  
**DALLE 9H ALLE 13H**

Le formazioni sono gratuite! Sfruttate quest'occasione unica!  
Iscrivetevi direttamente sul sito [winback.com](http://www.winback.com) rubrica Winback Academy.

<http://www.winback.com/it/winback-italia-tecarterapia-tour/>

A presto!

*If team Winback Academy*