

EXPERIENCE THÉRAPEUTIQUE ET FIBROMYALGIE

Winback Medical grâce à ses évolutions technologiques (touch&start, FixPads, Lowpulse...) a su développer un protocole spécifique répondant aux problématiques de soins de la fibromyalgie.

Votre collègue Guy Everts, masseur kinésithérapeute belge a profité de son expérience de cette pathologie pour adapter le protocole à chacun de ses patients atteints de fibromyalgie. Son témoignage est intéressant et riche d'enseignement thérapeutique... à lire !


« Depuis 5 mois, je soigne un groupe de 10 patients atteints de fibromyalgie par **Winback Thérapie**. Mes séances durent 25 minutes, débutant par un massage en **CET dynamique** avec une thermie moyenne à 30/40%.

Le travail manuel, étirements, frictions transverses, mobilisations, faciathérapie, s'effectue grâce aux **FixPads RET** positionnés en **myBack** toujours en thermie moyenne ressentie par le patient. Nous avons une liberté de travail à deux mains avec une qualité palpatoire pour s'adapter aux algies. J'insiste sur l'échange constant avec mon patient pendant la séance. Je n'hésite pas à diminuer la diathermie les deux premières séances.

S'il existe des troubles digestifs, j'adapte une période en faible thermie **Lowpulse en Deep cet**. Toutes les séances se terminent par un retour au calme efficace en **CET Lowpulse 10 %**. Grâce au soulagement de la douleur complète et la mobilité tissulaire, j'ai pu objectiver l'efficacité de la **Winback Thérapie** par les délais augmentés entre deux séances. Aujourd'hui : 4 patients sur 10 ne sont vus que toutes les 6 semaines, 4 patients toutes les mois et 2 patients toutes les 2 semaines.

Mes patients se sentent généralement moins fatiguées et plus forts mentalement. Les signes de dépression diminuent, la raison principale est de vivre une expérience positive de la winback thérapie. La contribution du thérapeute est primordiale pour cette pathologie et Winback répond à cette logique de soin.

Chers collègues, je peux à peine le croire, mais je peux dire sincèrement avoir 10 patients fibromyalgiques motivés !! Parceque la coopération du patient reste essentiel !! »

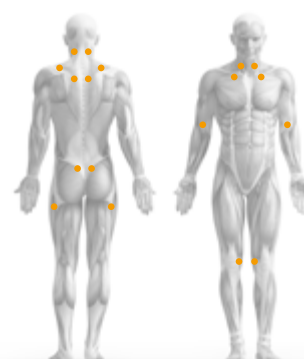

Localisation des neuf paires de points sensibles répondant aux critères du Collège américain de rhumatologie (en) pour la fibromyalgie

TECARTHERAPIE : FIBROMYALGIE

Objectif.

Supprimer la douleur en effectuant des segments longs entre l'électrode active et passive.

Position.

Allongée sur le ventre avec la plaque de retour en position ventrale.

ATHERMIE	0...20%	THERMIE FORTE	50...70%
THERMIE DOUCE	20...50%	HYPER THERMIE	70...100%

SEANCE 1

	CET THERMIE DOUCE	Léger massage global pour faire disparaître les points de tension.	DYN-AMIC	
	RET THERMIE DOUCE	Mode statique sur les extrémités afin de travailler sur les membres. Electrode main en extrémité de chaque membre. Point statique sur trapèze également.	LOW PULSE	
	CET ATHERMIE	Retour au calme pour éviter un effet rebond.	LOW PULSE	

SEANCE 2 & + « ENTRETIEN »

	CET THERMIE FORTE	Léger massage global pour faire disparaître les points de tension.	DYN-AMIC	
	RET THERMIE FORTE	Mobilisation et traction intensives.	LOW PULSE	
	CET ATHERMIE	Retour au calme pour éviter un effet rebond	LOW PULSE	



04 93 08 85 81
info@winback-medical.com
www.winback-medical.com

WINBACK CORPORATE
 885 Av. du Dr Lefebvre, Twins 2
 06270 Villeneuve Loubet