

> L'ACADEMY #1

VOTRE NOUVEAU RENDEZ-VOUS MENSUEL

L'EDITO

Nous sommes heureux de vous présenter le premier numéro de L'Academy : votre nouveau rendez-vous mensuel sur les informations de notre **académie Winback**.


Son principal objectif est de vous apporter une **synthèse de nos échanges sur les réseaux sociaux** tel que le groupe facebook Winback Academy - Physio - Sport.

De plus, nos experts vous présenteront des **protocoles spécifiques** correspondant aux différents départements de l'académie (thérapie manuelle, sport, intimacy, beauty...) mais aussi des **conseils d'utilisation, les formations à venir, les nouveaux accessoires** etc...

WINBACK

L'ACTUALITÉ DU MOIS

Ce mois-ci nous avons lancé une **étude sur les effets de la winback thérapie sur les genoux opérés suite à une PTG (de J15 à J30)**. C'est une vaste étude qui nécessite votre implication pour partager nos résultats thérapeutiques en técarthérapie dans le monde scientifique et médical.

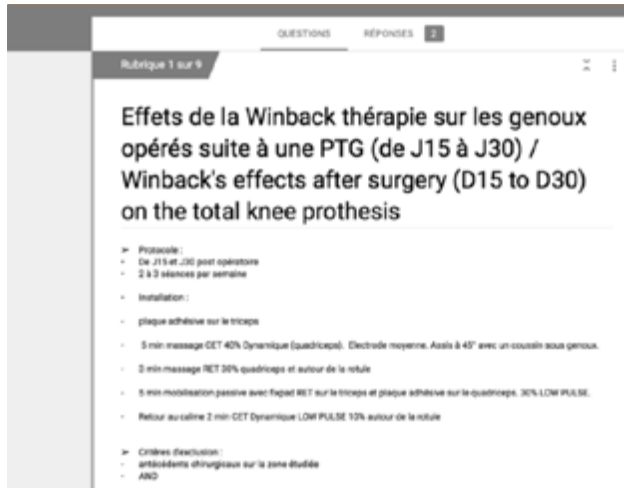

Si vous avez une PTG, pensez à nous !! le formulaire est très simple à remplir (retrouvez le sur le groupe facebook Winback Academy - Physio - Sport).

Vous souhaitez faire partie de l'aventure, envoyez un mail à zaineb@winback.com


WINBACK 1.0



WINBACK 2.0



WINBACK 3.0

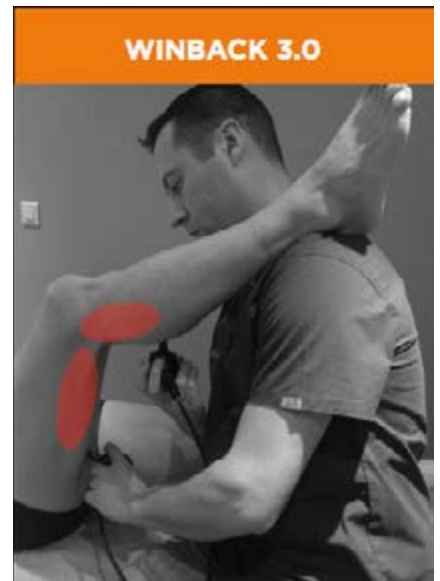




NOUVEAU CONCEPT EN DÉVELOPPEMENT : **WINBACK WOMAN CARE**

Winback va lancer de **nouveaux protocoles** afin de répondre aux **attentes spécifiques des femmes** tout au long de **moments importants de leurs vies**, tels que :

- le post-partum
- la ménopause
- les problèmes lymphatiques
- une approche de la beauté par la physiopathologie.

Aurore Chambaudu, Muriel Bise et Patricia Brizon vous dévoileront la **première version des protocoles** dans les prochains numéros. La sortie du concept complet est prévue pour le mois de **Septembre**.

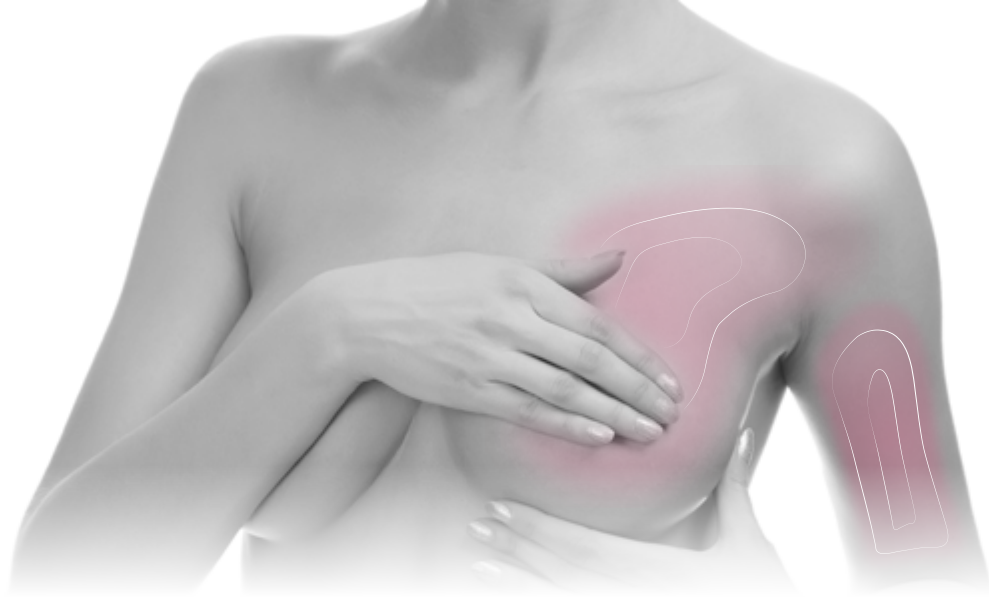

TRAITEMENT POST OPÉRATOIRE DU CANCER DU SEIN PAR WINBACK

Le kinésithérapeute Winback intervient généralement au moment de la chirurgie :

Après l'ablation du ganglion sentinelle ou après curage axillaire, pour entretenir la mobilité du membre supérieur opéré. A ce moment, **Winback** permet de mobiliser avec une antalgie totale les différentes articulations par sélection du mode résistif RET. En cas de lymphoedème (*œdème du bras d'origine lymphatique*), Winback favorise le drainage par stimulation sélective des différents ganglions (*vasodilatation local*) par application d'une électrode MIX3 focale. La **Winback thérapie** permet de lutter activement contre le lymphoedème au bras. Ce type de complication touche près d'1 femme sur 4. Cette complication se caractérise par une oedème au niveau du bras du côté atteint. Le bras a alors tendance à grossir. Il devient lourd et douloureux. Ce lymphoedème peut se manifester quelques jours après le traitement et ce jusqu'à des mois voir des années plus tard. L'utilisation de la **TECAR Thérapie Winback** permet de prévenir le lymphoedème ou d'éviter qu'il ne s'aggrave.

Avant une reconstruction mammaire, pour préparer la peau et les muscles, le thérapeute dispose de différentes méthodes pour gagner en souplesse tissulaire. **WINBACK 4.0** permet de cibler rapidement les différentes couches du derme. Opter pour le mode résistif inédit RET+ facilite le palpé-roulé manuel par un confort inégalé.

Après une reconstruction par prothèse pour lutter contre les adhérences. **Winback** élabore différents protocoles pour résorber les éventuels troubles circulatoires lymphatiques et ou hématomes. L'énergie **Winback** accélère la cicatrisation.

Après une reconstruction par grand dorsal pour éliminer les adhérences où le muscle dorsal a été prélevé, et tout risque de fibroses ultérieures, **Winback** innove avec un mode résistif SuperBeat associant à la diathermie un recrutement neuro-sensitif par secousses élémentaires (*largement reconnue dans le monde de la basse fréquence*).

En cas de douleurs postopératoires, pour un antalgie immédiate, un confort et des mouvements fonctionnels, **Winback** propose des séances sous le mode SWAP. Cette option permet d'alterner le mode capacitif et résistif pendant la séance.

NOUVEAU SHOWROOM WINBACK À PARIS / SALLE DE FORMATION :

Nous avons désormais un **nouveau showroom** qui fera office de **salle de formation** à Paris, 117 Boulevard Sebastopol 75002 Paris.

À VENIR EN JUIN : TROIS FORMATIONS MYEXPERT

10 JUIN 2017 - SHOWROOM PARIS
SPORT & FIT FORMATION
INTERNATIONALE



Boostez la pratique sportive avec l'énergie **WINBACK**.

Intervenants : **Pascal Gohier** (*kiné de l'équipe de France de Basket*), **Andrei Gheorgiu** (*Winback expert international - kiné du sport à Brasov, Roumanie*) et **Frédéric Delacour** (*Winback expert international - ostéopathe*).

Cette formation détaillera l'influence de l'énergie **Winback** sur les différentes phases de **prise en charge des sportifs** (*du renforcement à la récupération sportive*) et des cas pratiques tels que la pubalgie, les lésions myo-aponévrotiques ou le jumper knee de **la lésion jusqu'au retour sur le terrain**.

17 JUIN 2017 - SHOWROOM PARIS
INTIMITY



La douleur n'est pas une fatalité avec l'énergie **WINBACK**.

Venez découvrir les nouveaux protocoles Intimty articulés autour de la femme et de son intimité grâce à accessoires adaptés .

Winback Intimty apporte de nouvelles **solutions à vos patientes**, par une prise en charge **rapide, confortable et indolore**. La formation s'articule par un rapide rappel de la technologie **Tecar**, une méthodologie d'applications avec une hygiène renforcée et enfin une présentation de **nouveaux traitements testés et validés** par vos confrères: épisiotomie, incontinence urinaire, cicatrice de césarienne... vous serez surpris du **potentiel de votre équipement** puisqu'il suffit de l'ajout de quelques accessoires pour bénéficier d'un équipement **très efficace** dans le domaine de la **gynécologie et de l'urologie**.




**Approche viscérale et
técARTHÉRAPIE WINBACK.**

Intervenant : **Frédéric Delacour**
(*Winback expert international et ostéopathe à Ormesson, France*).

Comment associer la **thérapie manuelle viscérale** avec votre **équipement** ?

Cette formation détaillera les techniques de thérapie manuelle des régions **hépatique, gastrique, péritonéale et sphinctérienne**. Que vous soyez novices ou plus expérimentés en thérapie viscérale, vous serez surpris de la **facilité de traitement** apporté par la Tecarthérapie.

LA PHOTO DU MOIS : DRY NEEDLING


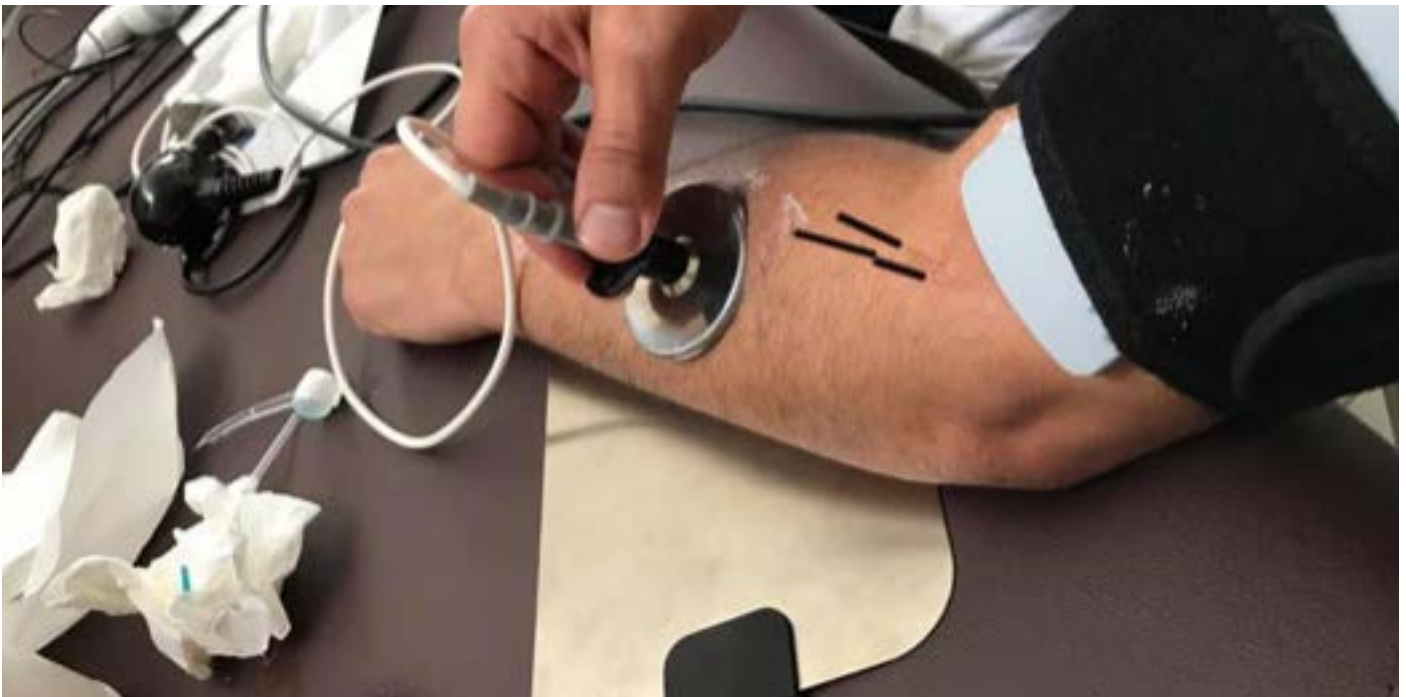


Le conseil de l'ordre est en train d'étudier la possibilité de faire entrer dans notre champ de compétence la **pratique du dry needling** (*utilisation d'aiguilles d'acupuncture pour traiter les trigger points*). Espérons que cela soit pour bientôt ! Cette technique est déjà utilisée par la plupart de nos confrères européens. En particulier les grecs qui ont déjà trouvé le moyen de l'**associer à la Winback thérapie**. Merci à **Anastasios Tolis** notre expert pour la **Winback Academy Grèce**.

N'hésitez pas à nous envoyer vos photos (à zaineb@winback.com) pour paraître dans cette rubrique !

2. IRM 5 JOURS APRES LA BLESSURE





et un jour après le premier traitement avec tecartherapie WINBACK sur le quadriceps gauche

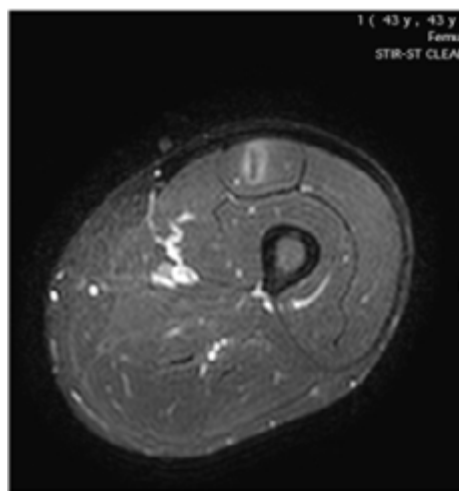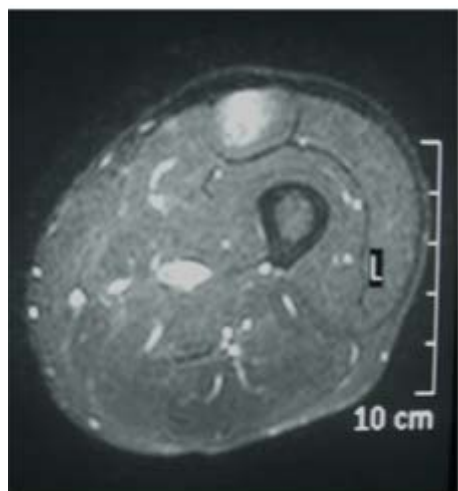

Reduction de l'œdème de 60% sur le quadriceps gauche.

3. IRM 9 JOURS APRES LA BLESSURE

AVANT LE SECOND TRAITEMENT

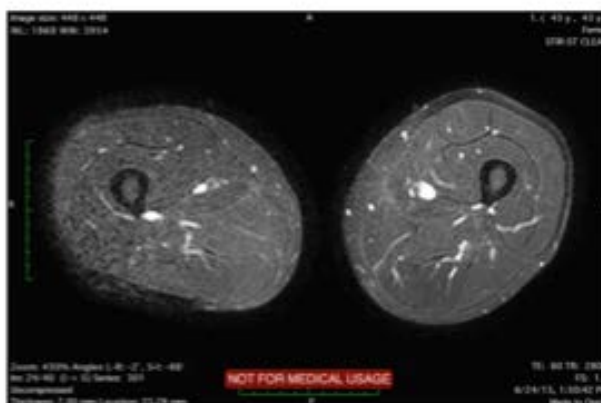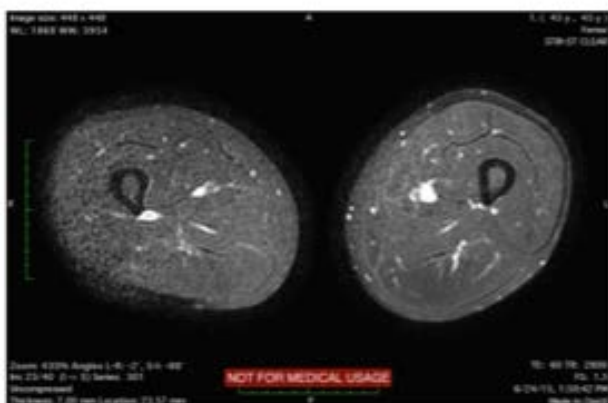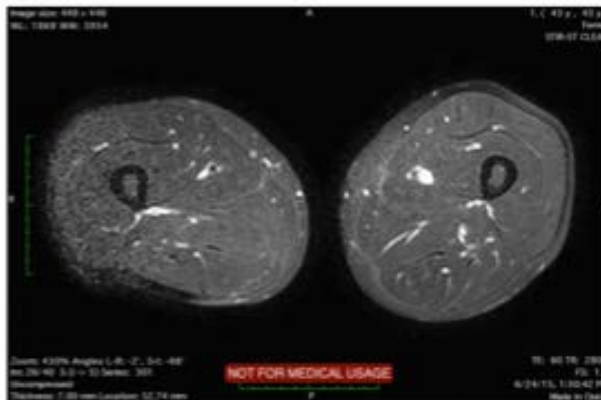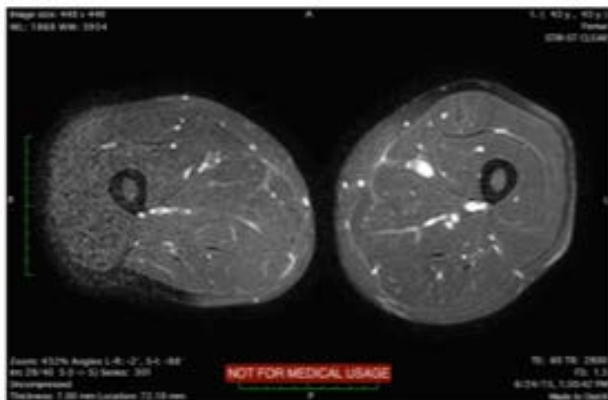

Pas de changements des 2 côtés

4. IRM 20 JOURS APRES LA BLESSURE

Le second traitement a été donné 5 jours après le 1er et 9 jours après la blessure sur les 2 quadriceps dans le cadre d'un repos total.

L'athlète a repris une activité sportive complète 25 jours après sa blessure avec une résorption totale de l'œdème des 2 côtés.

5. APRÈS UN TRAITEMENT

Le traitement Tecar Therapie à été administré à l'aide d'une WINBACK

DÉCOUVREZ 5 FAÇONS D'UTILISER VOTRE WINBACK EN VIDÉO.

WINBACK®

PRISE EN MAINS

WINBACK 1.0
MODE MANUEL

Fréquence entre
300 et 500 kHz

WINBACK®

PRISE EN MAINS

WINBACK 2.0
MODE MAINS LIBRES

Fréquence entre
300 et 500 kHz

WINBACK®

PRISE EN MAINS

WINBACK 3.0
MODE EXPERT

Fréquence entre
300 et 500 kHz

WINBACK®

PRISE EN MAINS

WINBACK 4.0
MODE EXPRESS

Fréquence
1 MHz

WINBACK®

PRISE EN MAINS

WINBACK 5.0
MODE INTELLIGENT

Fréquence entre
300 et 500 KHz

LE COURRIER DES LECTEURS

Cette rubrique est faite pour que nous prenions le temps de vous répondre concernant les **cas qui vous posent problème**. Nos experts en **thérapie manuelle**, **thérapie sportive**, **intimity & beauty** se feront un **plaisir de vous répondre** et de **détailler leurs protocoles**. Soumettez nous vos cas à l'adresse suivante : zaineb@winback.com

A VOS AGENDAS : PROCHAINES FORMATIONS !

MAI 2017

17 MAI 2017
MYPRACTICE PARIS

18 MAI 2017
MYPRACTICE NICE

19 MAI 2017
MYBEAUTY NICE

20 MAI 2017
CRYOBACK PARIS

JUIN 2017

10 JUIN 2017
MYEXPERT SPORT PARIS

14 JUIN 2017
MYPRACTICE PARIS

15 JUIN 2017
MYBEAUTY PARIS

17 JUIN 2017
INTIMITY PARIS

24 JUIN 2017
MYEXPERT THÉRAPIE MANUELLE
VISCÉRALE PARIS

Les formations sont gratuites ! Profitez en !

Inscrivez vous directement sur le site [Winback.com](http://www.winback.com) rubrique **Winback Academy**.

<http://www.winback.com/fr/formations/>

A bientôt !!

L'équipe Winback Academy