



FDA CLEARED
— BACK™ —



BOLETÍN INFORMATIVO

WINBACK ESPAÑA NEWSLETTER - ENERO 2019

El uso de brazaletes en la recuperación del movimiento

Fisioterapia manual con brazaletes que transmiten la tecnología WinBack para recuperación de hombro.



Winback en la VII Jornada de Fisioterapia Interdisciplinar UFA Meeting

El pasado viernes 11 y sábado 12 de enero estuvimos en el stand nº10 del UFA Meeting 2019, un Congreso de Fisioterapia, Medicina deportiva, cirugía deportiva, ortopedia y educación física en el que Winback estuvo presente junto a DJO España.

VII JORNADA DE FISIOTERAPIA INTERDISCIPLINAR
UFA MEETING

VITORIA-GASTEIZ 11-12 DE ENERO 2019

SÍNDROME FEMOROPATELAR Y PATOLOGÍA DE CADERA POR CAPAS

UFA
Unidad de Fisiología Avanzada
Advanced Physiotherapy Unit

vithas
Hospital
San José

VISÍTANOS EN EL STAND Nº10

DJO® POWERING MOTION

TECNOLOGÍA

Winback ha implementado en su equipo BACK 1 una nueva opción para que los terapeutas ciegos puedan utilizarla. Una pantalla táctil en braille, una verdadera innovación en tecarterapia que mejorará la accesibilidad de nuestra tecnología para todos los usuarios.

NUEVO - PANTALLA TÁCTIL EN BRAILLE.



Back 1 y Back 3 certificadas por la FDA

Back 1 y Back 3 están certificados por la FDA, lo que demuestra la calidad y confiabilidad de los productos Winback. La Administración de Drogas y Alimentos es la agencia federal estadounidense responsable del control y supervisión de productos médicos y de alimentos. Fija estrictos estándares de salud y seguridad para todos los dispositivos médicos comercializados en los EE. UU.



FDA CLEARED
— BACK™ —



BEAUTY

Protocolo clásico contra el envejecimiento + Tecar 6

Fase 1 Reclutamiento vascular.

Activar la fase 2. CET Dynamic. Zona 60% inferior 10min.

Lowpulse. 40% del área superior 4min

Fortalecer. Tecar 6. Medio. Trabajo local sobre imperfecciones 4min.

Modelador de Fase 3. Pulseras RET +. 40%. 4min

Fase 4 Tonificar. Mix Dynamic. 40% zona inferior 3 min.

Mix Lowpulse 40% zona superior 1min

Fase 5 Regreso a la calma. CET Dynamic Lowpulse 10%. 2 minutos.




*Protocolo efectuado en Francia.

FERIA

Winback en la conferencia de fisioterapia más grande de los EE.UU

Del 23 al 26 de enero se llevó a cabo en Washington (distrito de Columbia) el APTA CSM 2019, la conferencia de fisioterapia más grande de los EE. UU.

En donde se dieron a conocer nuestros productos y conocimientos en el stand 2001 junto a Cheick Kongo.

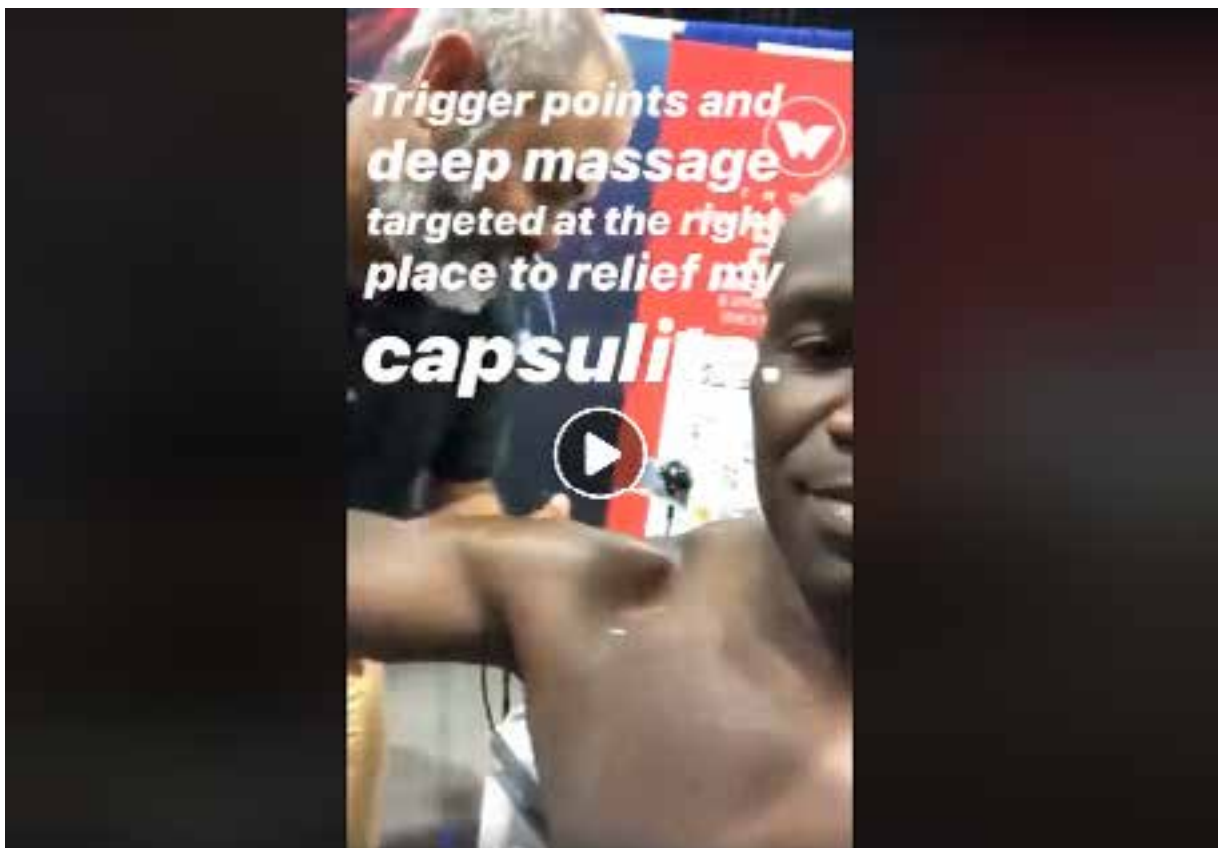

INTIMITY

Formación a la Unidad de Suelo pélvico del Hospital Clínico de Valladolid y a la clínica Ficosalud de Soria por parte de nuestra formadora Lucía Martínez.



FORMACIÓN

Workshop Physio en Colombia

Próximo Workshop My Start Physio en Medellín, Colombia el próximo sábado 23 de febrero con el formador y fisioterapeuta Adrian Stern.



FORMACIÓN EN TECARTERAPIA

Acciones biológicas

Efectos terapéuticos

Diferentes modos de emisión y aplicación

Fusión de la Tecarterapia con las técnicas manuales

Práctica en distintas lesiones

Tratamiento de pacientes reales

INFORMES E INSCRIPCIÓN

CONTACTO:

adrian.stern@innovatec.net.co

TELÉFONO:

(571) 358 51 92

WHATSAPP:

(571) 310 337 07 52

MY START PHYSIO



WINBACK

SÁBADO 23 DE FEBRERO 2019 - 2:00 PM
TORRE MEDICA SALUD Y SERVICIOS
CALLE 19A # 44-25, MEDELLÍN (ANT.)



FORMADOR



Adrián Stern

Fisioterapeuta con más de 12 años de experiencia en Tecarterapia, especializado en lesiones ortopédicas, deportivas y osteopatía, formador oficial WINBACK.

TESTIMONIO

Mauricio Tirado Bedoya (fisioterapeuta) presenta la tecarterapia Winback durante el programa «Muy Femenino», transmitido por Cosmovision Colombia



SPORT

Winback Equine en todo el mundo

Desde los futbolistas de la Selección Española a los caballos del equipo dominicano, todos confían en las manos mágicas de Lorenzo! Gracias por la visita y suerte en el partido contra Croacia!

